

Guide de maintenance pour la gamme

Activité	Quotidien	Hebdomadaire
Videz et Nettoyez le filtre d'aspiration		
Lavez la sellerie avec de l'eau et du savon doux		
Purgez les lignes d'eau en respectant le protocole A-dec*. 3min en début de journée et 30sec après chaque patient.		
Inspectez les tubulures et les connexions		
Nettoyez les plastiques avec de l'eau et du savon doux		
Nettoyez la protection de l'éclairage avec de l'eau et du savon doux		
Nettoyez le bras flexible de l'unit avec de l'eau et du savon doux		
Remplacez la gaze et contrôlez si il y a des débris.		

Date du travail réalisé: _____

Initiales du technicien: _____

Merci de noter:

Tous types de nettoyant chimiques sont nuisibles aux plastiques et aux selleries. Utilisez les moins agressifs possible. Toujours utiliser des pièces A-dec et des techniciens certifiés A-dec.

Ceci est un guide de maintenance non contractuel. La maintenance n'arrête pas l'usure normale.

Activité		Mensuellement	Annuellement
Lubrifiez avec du SILICONE les joints toriques suivants	Bouteille		
	Couvercle du collecteur sur fauteuil ou pack assistante		
	Canule aspiration		
	Canule pompe à salive		
Contrôlez les temporisations de remplissage si existantes.			
Contrôlez les sécurités présentes sur l'équipement			
Inspectez visuellement toutes les connexions			
Remplacez le filtre 24.0234.00 dans la boîte au sol.			

Indiquez les dégâts:

Identification des causes: